

Рекомендовано  
Ассоциацией клинических реабилитологов РФ



**Контакты:**

**8 (499) 403 14 23**  
**8 (800) 70 731 70**

125252, г. Москва, ул. Ходынский б-р, д. 17

[www.detensor.ru](http://www.detensor.ru)

## Ортопедическая под спинную подушка **Detensor®**

в автомобиль, для дома и офиса

### Инструкция по эксплуатации

#### Гарантийные обязательства

**Важно!** В период привыкания к подушке допустимы дискомфортные ощущения, которые проходят в течение 7 дней.

- Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие свойства подушки<sup>1</sup>;
- Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении и использовании. Храните подушку вдали от источников сильного запаха. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течении 24 часов;
- Фабричный чехол защищает от воздействия внешних факторов на материал подушки (влага, загрязнения), но может сохранять запах нового изделия и упаковки. В случае выявления запаха необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в течении 24 часов;
- Допустимо неравномерное изменение цвета пенополиуретана под воздействием лампового освещения и солнечных лучей<sup>2</sup>;
- Гарантия распространяется при сохранении этикетки и документов, подтверждающих дату, место и стоимость продукции.

#### Способ применения:

- Отрегулируйте под спинную часть, чтобы между сиденьем был угол 90°.  
Выберите подходящий вариант крепления подушки, исходя из Вашего кресла;

Регулировка сиденья      Горизонтальный      Вертикальный
- Отрегулируйте стропу по длине, чтобы крепежный ремень плотно прилегал к спинке кресла;
- Проденьте стропу через направляющие элементы на подушке;
- Важно ! Установите подушку на кресле этикеткой вниз, как показано на рисунке справа.**

<sup>1</sup> Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с правилами эксплуатации.

<sup>2</sup> Целостность структуры, плотность и свойства пенополиуретана сохраняются.

## **Ортопедическая подушка для пассивной разгрузки позвоночника в сидячем положении с системой Detensor®**

### **Назначение**

- Профилактика заболеваний поясничного отдела позвоночника различного происхождения;
- Профилактика усталости и болей в спине;
- Поддержка при длительных поездках;
- Эргономичный комфорт автомобильного и рабочего места.

### **Эффективность**

- Обеспечение правильного физиологического положения нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника во время вождения автомобиля за счет выраженного поясничного изгиба, тем самым обеспечивая максимальную площадь опоры;
- Формирование правильной осанки;
- Устранение повышенного тонуса околопозвоночных мышц спины и его нормализация в поясничном отделе позвоночника;
- Значительная разгрузка позвоночника (до 50% от веса тела в сидячем положении);
- Защита от вибрационного воздействия на позвоночник, вызванного неровностями на дорогах;
- Повышает концентрацию внимания и выносливость для профессий, связанных с длительным сидением (профессиональные водители, офисные сотрудники, диспетчеры, работники call – центров и т.д.).

### **Подбор размера**

Ортопедическая подушка Detensor имеет универсальный размер и не требует специального подбора. **32x52x7 см**

### **Цвет**

Чёрный, серый.

### **Состав**

Основа: 1. Эластичный пенополиуретан с низким коэффициентом деформации;  
2. Гипоаллергенный;  
3. Не содержит агрессивных химических веществ.

### **Комплектность**

Подушка, чехол (не съёмный) с ремнём для фиксации, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по применению, документы на продукцию.

### **Правила ухода за изделием**

**Внимание ! Чехол несъёмный, т.к. ткань плотно прилегает к рёбрам за счёт фиксирующих элементов.**

- В случае загрязнения применить чистящие средства по уходу за тканью<sup>3</sup>;
- Не использовать отбеливатели, органические растворители, вещества, содержащие хлор и альдегиды.

<sup>3</sup> Нанести чистящее средство на ткань, через 10–15 мин. очистить впитывающей тканью, салфеткой, губкой. В случае необходимости допустимо повторить процедуру чистки.

### **Показания к применению**

#### **Важно!**

**Применяется на протяжении всего рабочего дня во время длительного сидения.**

- Дискомфорт и болевые ощущения в области спины и поясницы во время вождения автомобиля, а также на рабочем месте;
- Профилактика и лечение обострений хронических заболеваний позвоночника (радикулит, сколиоз, остеохондроз, межпозвоночные пролапсы и грыжи);
- Мышечный дисбаланс и перенапряжение околопозвоночных мышц спины в области нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника;
- Улучшение эргономики автомобильного кресла и рабочего места;
- Реабилитация при комплексном лечении после травм и операций на позвоночнике.

#### **Внимание!**

**При использовании изделия в комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.**

### **Противопоказания**

Абсолютных противопоказаний к применению не выявлено.

### **Правила эксплуатации**

- Ортопедическая подушка предназначена в повседневной жизни исключительно в положении сидя;
- Перед эксплуатацией необходимо снять индивидуальную полиэтиленовую упаковку;
- При хранении и эксплуатации необходимо избегать попадания влаги внутрь во избежание образования конденсата. Температура эксплуатации на протяжении гарантийного срока от -45 °C до +45 °C;
- При попадании воды или другой жидкости необходимо немедленно сбрить её сухим, чистым, хорошо впитывающим материалом (ткань, салфетка, губка);
- Не допускается располагать ближе 1,5 м от электронагревательных приборов или источников открытого огня;
- Не допускается подвергать сильным локальным нагрузкам (прыгать, ходить, ставить тяжёлые предметы с острыми или режущими краями).