



Рекомендовано
Ассоциацией клинических реабилитологов РФ



Подспинная подушка Детензор

для дома, офиса и автомобиля

**Инструкция по
эксплуатации**

Подспинная подушка Детензор для пассивной разгрузки позвоночника

Результаты применения:

- Обеспечение максимальной площади опоры нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника в физиологическом положении.
- Формирование правильной осанки
- Снижение и нормализация повышенного тонуса околопозвоночных мышц спины в поясничном отделе позвоночника
- Разгрузка позвоночника до 50% (по сравнению с обычным креслом) в положении сидя (снижение давления массы тела на позвоночник за счет поддержки и разгрузки)
- Защита от вибрационного и компрессионного воздействия на позвоночник, вызванного неровностями на дорогах
- Повышение концентрации внимания и выносливости
- Снижение стрессовой нагрузки

Размер изделия:

55 x 35 x 7,5 см

Состав:

Подспинная подушка:
высокоэластичный пенополиуретан контурной резки

Чехол:
100% микрофибра износостойкая, экокожа

Комплектность:

Подспинная подушка, чехол на молнии (не съемный), ремень для фиксации, инструкция по эксплуатации / гарантийный талон, регистрационное удостоверение медицинского изделия.

Правила ухода за изделием:



Внимание!

Чехол не съемный! Ткань полностью повторяет форму изделия и фиксируется к ребрам с помощью специального клея. Молния выполняет исключительно смотровую функцию.

- Чистка изделия возможна с использованием специальных средств по уходу за замшей и микрофиброй. Нанести чистящее средство на ткань. Через 10-15 мин. очистить впитывающей тканью (салфеткой или губкой). В случае необходимости процедуру повторить.
- Не использовать отбеливатели, органические растворители, вещества, содержащие хлор и альдегиды.

Эффективность применения:

 **Важно!** Для достижения лечебного эффекта при заболеваниях позвоночника рекомендуется использовать подспинную подушку в комплексе с терапевтическим матом Детензор. Не имеет ограничений по длительности использования.

- Уменьшение дискомфорта и болевых ощущений в области спины и поясницы во время длительного нахождения в положении сидя (в автомобиле, на рабочем месте и т.д.)
- Лечение (в комплексной терапии) и профилактика хронических заболеваний позвоночника (радикулит, сколиоз, остеохондроз, межпозвоночные протрузии, грыжи и т.д.)
- Снижение риска обострений заболеваний позвоночника
- Устранение перенапряжения и мышечного дисбаланса в области нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника
- Улучшение эргономики автомобильного кресла и рабочего места
- Реабилитация при комплексном лечении после травм и операций на позвоночнике

 **Внимание!** Перед использованием изделия при комплексном лечении необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом.

Противопоказания:

Противопоказания к применению не выявлены.

Правила эксплуатации:

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с данным руководством.

- Подспинная подушка Детензор предназначена для ежедневного использования исключительно в положении сидя.
- Использовать при температуре от -45°C до +45°C.
- Перед первым использованием необходимо снять индивидуальную полиэтиленовую упаковку.
- Избегать попадания влаги, прямых солнечных лучей и яркого искусственного света на изделие.
- При попадании на изделие воды или другой жидкости необходимо сразу удалить ее. Выжимать изделие запрещено.
- Не использовать, не хранить вблизи электронагревательных приборов и источников открытого огня.
- Не подвергать сильным локальным нагрузкам (не растягивать, не перекручивать, не выжимать), не использовать пылесосы и моющие пылесосы.

Гарантийные обязательства:



Важно!

Ввиду индивидуальных особенностей организма период привыкания может составлять от 3 до 14 дней регулярного использования.

- Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие свойства подспинной подушки Детензор.¹
- Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитывать посторонние запахи при транспортировке, хранении и использовании. Храните изделие вдали от источников сильного запаха.
- Фабричный чехол защищает от воздействия внешних факторов на пенополиуретан (влага, загрязнения), но может сохранять запах нового изделия и упаковки. В случае выявления запаха необходимо проветрить изделие на свежем воздухе в течение 24 часов.
- Допускается неравномерное изменение цвета пенополиуретана под воздействием искусственного освещения и прямых солнечных лучей.²
- Гарантия действует при условии сохранения этикетки и документов, подтверждающих покупку изделия.

¹ Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с правилами эксплуатации.

² Целостность структуры, плотность и свойства пенополиуретана сохраняются.

Установка и применение:

1

Отрегулируйте кресло так, чтобы угол между спинкой и сиденьем составил 90°.

С учетом особенностей конструкции вашего кресла выберите горизонтальный или вертикальный вариант крепления подушки к спинке сиденья.



2

Проденьте фиксирующий ремень через крепежные петли на подушке.

3

Отрегулируйте ремень по длине так, чтобы он плотно прилегал к спинке кресла. Затем зафиксируйте застежку.



Важно! Подушка должна быть установлена на кресле этикеткой вниз (как показано на рисунке справа).

