



Рекомендовано
Ассоциацией клинических реабилитологов РФ



Подушка на сиденье **Detensor**[®]

для ЛПУ и в домашних условиях

**Инструкция
по эксплуатации**

Подушка на сиденье с системой **Detensor®**

Создание дополнительного комфорта и терапия при нахождении в положении сидя.

Показания к применению:

- Травма седалищного бугра;
- Реабилитация после травм промежности, таза и копчика;
- После хирургического лечения геморроидальных узлов;
- Беременным женщинам для создания повышенного комфорта в положении сидя;
- Беременным женщинам для снижения давления на область малого таза и предотвращения нарушений кровообращения прямой кишки;
- Профилактика пролежней;
- Для лиц с ограниченными возможностями (инвалидная коляска);
- Нарушение осанки;
- Боли в спине при долгом нахождении в вынужденном положении сидя;
- Улучшение эргономики и зоны комфорта рабочего места;
- Профилактика и лечение геморроя;
- Застойные явления как следствие сидячего образа жизни.

Гарантийные обязательства:

Важно! Ввиду индивидуальных особенностей организма период привыкания составляет от 3 до 14 дней непрерывного использования.

- Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие свойства подушки¹.
- Медицинский пенополиуретан – дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении и использовании. Храните подушку на сиденье Detensor вдали от источников сильного запаха. В случае выявления запаха необходимо проветрить на свежем воздухе в течение 24 часов.
- Чехол защищает от воздействия внешних факторов на полимер (влага, загрязнения), но может сохранять запах нового изделия и упаковки. В случае выявления запаха необходимо проветрить на свежем воздухе в течение 24 часов.
- Допускается неравномерное изменение цвета пенополиуретана под воздействием лампового освещения и солнечных лучей, а также остаточное уменьшение высоты до 5 мм относительно краёв подушки².
- Гарантия распространяется при сохранении этикетки и документов, подтверждающих дату, место и стоимость продукции.

¹ Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с правилами эксплуатации.

² Целостность структуры, плотность и свойства пенополиуретана сохраняются.

Правила эксплуатации:

- Перед эксплуатацией необходимо снять индивидуальную полиэтиленовую упаковку.
- При хранении и эксплуатации необходимо избегать попадания влаги внутрь во избежание образования конденсата. Температура эксплуатации на протяжении гарантийного срока от -45°C до $+45^{\circ}\text{C}$
- При попадании воды или другой жидкости необходимо немедленно собрать её сухим, чистым, хорошо впитывающим материалом (ткань, салфетка, губка).
- Не допускается располагать ближе 1 метра от электрогревательных приборов или источников открытого огня.
- Не допускается подвергать сильным локальным нагрузкам (прыгать, ходить, ставить тяжёлые предметы с острыми или режущими краями), использовать для чистки выбивалки и моющие пылесосы.
- После стирки фабричного чехла необходимо расправить и выровнять относительно габаритов изделия по краям (поправить смещение чехла по торцам, разгладить рукой складки и неровности), затем застегнуть молнию.
- Запрещается одевать чехол на изделие после санации до полного его высыхания!

Абсолютные противопоказания:



Внимание!

При использовании изделия для лечения или реабилитации необходима консультация специалиста!

Абсолютные противопоказания предполагают полный отказ от применения подушки на сиденье Detensor.

- Острые травматические повреждения позвоночного столба и спинного мозга.
- Острые травмы и воспалительные процессы органов малого таза.

Относительные противопоказания:

- Относительных противопоказаний не выявлено.



Важно! Данное изделие можно использовать в инвалидной кресло-коляске! Подтверждено сохранение терапевтических свойств изделия!



Способ применения:

- 1 Установите подушку на ровное, упругое сиденье (стул, автокресло, инвалидная коляска), этикеткой к спинке, как показано на рисунке;



Примечание: Отрегулируйте подспинную часть, чтобы между сиденьем был угол 90° .

- 2 При желании выберите подходящий вариант крепления подушки;
- 3 Отрегулируйте стропу по длине, чтобы крепёжный ремень плотно прилегал к сиденью;
- 4 Проденьте стропу через направляющие элементы на подушке.

Размер:

Подушка на сиденье Detensor имеет универсальный размер и не требует специального подбора. **40x6x42 см**

Состав:

Основа: Медицинский высокоэластичный пенополиуретан.

Чехол на молнии: Микрофибра износостойкая, гипоаллергенная, 100% полиэстер.

Комплектность:

Подушка, чехол, ремень для фиксации, инструкция по эксплуатации, каталог.

Важно! Рекомендовано для совместного применения с подспинной подушкой Detensor. Применение в комплексе уменьшает давление на нижне-грудной, поясничный и крестцово-копчиковый отделы позвоночника.

