



Рекомендовано  
Ассоциацией клинических реабилитологов РФ



# Ортопедическая подушка **Detensor®**

для ночного сна и отдыха

**Инструкция  
по эксплуатации**

## Ортопедическая подушка Detensor®

### Показания к применению:

- Улучшение качества сна в дневное и ночное время
- Для поддержания головы и шеи в физиологически правильном положении
- Реабилитация в период после травм и в комплексной программе лечения остеохондроза
- Нарушение баланса мышечного тонуса в затылоч-но-шейной зоне и области плечевого пояса
- Недостаток полноценного мозгового кровообращения и поступления кислорода в сосуды головного мозга в достаточном объеме
- Нарушение сна, головные боли напряжения и головокружение

### Гарантийные обязательства:

**Важно!** Ввиду индивидуальных особенностей организма период привыкания составляет от 3 до 14 дней непрерывного использования.

- Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие свойства подушки для ночного сна Detensor<sup>1</sup>.
- Пенополиуретан – дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, хранении и использовании. Храните подушку для ночного сна Detensor вдали от источников сильного запаха. В случае выявления запаха необходимо проветрить на свежем воздухе в течение 24 часов.
- Фабричный чехол защищает от воздействия внешних факторов на полимер (влаги, загрязнения), но может сохранять запах нового изделия и упаковки. В случае выявления запаха необходимо проветрить на свежем воздухе в течение 24 часов.
- Допускается неравномерное изменение цвета пенополиуретана под воздействием лампового освещения и солнечных лучей, а также остаточное уменьшение высоты до 5 мм относительно краёв валика<sup>2</sup>.
- Гарантия распространяется при сохранении этикетки и документов, подтверждающих дату, место и стоимость продукции.

<sup>1</sup> Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с правилами эксплуатации.

<sup>2</sup> Целостность структуры, плотность и свойства пенополиуретана сохраняются.

## Правила эксплуатации:

**Важно! Перед использованием обязательно ознакомьтесь с данным руководством!**

- Подушка для ночного сна Detensor предназначена в повседневной жизни исключительно в положении лежа на спине.
- Перед эксплуатацией необходимо снять индивидуальную полиэтиленовую упаковку.
- При хранении и эксплуатации необходимо избегать попадания влаги внутрь. Температура эксплуатации на протяжении гарантийного срока от  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$
- При попадании воды или другой жидкости необходимо немедленно собрать её сухим, чистым, хорошо впитывающим материалом (ткань, салфетка, губка). Запрещается выжимать изделие.
- Не допускается располагать ближе 1 метра от электронагревательных приборов или источников открытого огня.
- Не допускается подвергать сильным локальным нагрузкам (растягивать, перекручивать, выжимать), использовать для чистки выбивалки и моющие пылесосы.
- Разрешена только стирка чехла. После стирки, чехол необходимо расправить и выровнять относительно габаритов изделия по краям (поправить смещение чехла по торцам, разгладить рукой складки и неровности), затем застегнуть молнию. Не допускается надевать чехол на изделие до полного его высыхания.

## Абсолютные противопоказания:

- Острые дисковые миелопатии;
- Спинальные и сосудисто-корешково-спинальные синдромы (инсульты спинальных артерий, при хронической миелопатии и т.д.);
- Оклюзия позвоночных артерий;
- Опухоли позвоночного столба и спинного мозга в терминальной стадии;
- Специфические и неспецифические инфекционные процессы позвоночного столба;
- Острые и подострые воспалительные заболевания спинного мозга и его оболочек (миелит, менингит);
- Острые травматические повреждения позвоночного столба и спинного мозга.

Запрещается использование данного изделия при наличии противопоказаний, в случае возникновения болей и сильного дискомфорта - необходимо немедленно прекратить использование.

## Относительные противопоказания:

- Врожденные аномалии развития (незаращение дужек позвонков, сакрализация, люмбализация)
- Спондилолистез выше II стадии
- Нестабильность позвоночных сегментов III стадии (спондилолистез, дискотомия, ламинэктомия и т.д.)
- Болезнь Бехтерева (после консультации с лечащим врачом)

## Способ применения:

**Важно!** Подушку рекомендовано использовать для сна на спине и на боку.



- 1 Подушку располагают валиком под шею. Не предназначена для сна на животе.

За счёт запатентованной структуры ребер, во время процедуры, шейный отдел позвоночника находится в правильном, нейтральном физиологическом положении.

## Размер:

Подушка для ночного сна Detensor имеет универсальный размер и не требует специального подбора. **50 \* 10 \* 40 см**

## Состав:

Основа:

Пенополиуретан горячего вспенивания с эффектом памяти.

Чехол на молнии: 67,5% полиэстер, 32,5% вискоза.

Наволочка: 100% хлопок. Волокно на основе бамбука.

## Комплектность:

Подушка, чехол (съемный), наволочка (съемная), инструкция по применению.

## Конструкция:

Высота валика в основании подушки рассчитаны таким образом, чтобы при опоре головы давление валика на шею было минимальным, но достаточным для необходимой поддержки шейного отдела.

